



Laite päälle



Aseta ikä



Aseta pituus



Sukupuolen valinta; ♂ mies, ♀ nainen



Potilas puhaltaa mittariin istuen katse kohdistettuna eteenpäin.

Puhallusten välillä ei tarvitse koskea painikkeisiin.

Puhalluksia tehdään kolme ja niiden tulokset kirjataan ylös jokaisen puhalluksen jälkeen.



Kolmesta puhalluksesta valitaan paras.

Puhdistusohje



- Vitalograph -laite tulee puhdistaa noin 100 puhallutetun potilaan jälkeen tai noin kerran kuukaudessa
- Vitalograph -laitteen yläosa irrotetaan nykäisemällä se irti laitteen runko-osasta



- Yläosa huuhdellaan ensin vedellä
- Yläosan puhistukseen voidaan käyttää desinfektoivia puhdistusaineita esim. natriumhypokloriittia
- Puhdistuksen jälkeen yläosa huudellaan vedellä
- Tämän jälkeen yläosa tulee kuivata huolella – parhaiten kuivaus tapahtuu laittamalla yläosa kuivumaan yön yli tai kuivauskaappiin
- Runko-osa voidaan pyyhkiä isopropanoli alkoholilla
- Paina yläosa takaisin runko-osaan kunnes kuuluu "click"